









SKIN REMODELING
SYSTEM.....
powered by HVPC technology

MANUEL
D'INSTRUCTIONS




SILHOUET-TONE®

SKIN REMODELING SYSTEM

MICRO-COURANTS

- En utilisant les micro-courants impulsés nous reproduisons nos propres courants biologiques, 50 à 250 mA.
- La cliente ressent des picotements et une stimulation musculaire. Dans le cas d'une gêne, baisser les micro-courants.
- Augmenter l'intensité des micro-courants en fonction de la morphologie des muscles et de l'âge de la cliente.

ULTRASONS

- L'ultrason agit dans la couche dermique de la peau. Les ultrasons stimulent les fibroblastes dans le but de produire du collagène.
- La cliente ressent de la chaleur.
- Augmenter la fréquence des ultrasons. La chaleur doit être appréciée par la cliente. Les peaux sensibles ou couperosées sont plus sensibles à la chaleur.

HVPC

- L'HVPC est un courant de la famille des galvaniques. Il renouvelle les fibres musculaires endommagées et stimule la reminéralisation osseuse, similaire au calcium.
- La cliente ressent des spasmes. Au niveau de l'orbiculaire des lèvres, la cliente peut avoir un inconfort dans ses gencives.
- On peut augmenter les intensités de l'HVPC
Le soin doit TOUJOURS être confortable ! S'il est inconfortable et que les muscles ont des spasmes trop forts, le corps pour se défendre produira de l'acide lactique (toxine) et créera l'effet contraire (relâchement cutané).

ELECTROPORATION ET IONTOPHORESE

- L'Électroporation et l'iontophorèse sont des courants associés pour faire pénétrer le gel Smooth Skin.
- L'électroporation permet la pénétration de grosses molécules. Méthode utilisée pour remplacer les injections, elle favorise la pénétration à travers la couche cornée.
- L'iontophorèse permet la pénétration de petites molécules par polarisation de la couche cornée.
- La cliente ressent un goût métallique dans la bouche et des picotements.
- Ne pas modifier les intensités.

FICHE CLIENTE

Informations personnelles

Prénom: _____ Nom: _____
 Date: _____ Sexe : _____
 Date de naissance : _____
 Adresse : _____ Téléphone: _____
 Code postale : _____
 Profession : _____

Informations médicales

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Grossesse | ☐ Cancer/VIH | ☐ Plaies ouvertes |
| ☐ Epilepsie | ☐ Peau éraflée | ☐ Psoriasis |
| ☐ Stimulateur cardiaque | ☐ Infections | ☐ Dermate |
| ☐ Diabète actif | ☐ Inflammations | ☐ Thrombose |
| ☐ Médicaments anticoagulants (Coumadin) | | |
| ☐ Implants métalliques | Localisation : _____ | |
| ☐ Chirurgie récente | Localisation : _____ | |
| Autres : _____ | | |

Les traitements du SKIN REMODELING SYSTEM sont entièrement sécuritaires. Il faut toutefois faire preuve de prudence en présence de certaines maladies ou de conditions physiques.

Une période d'attente de 2 à 4 semaines est nécessaire après des injections de Botox ou d'autres agents volumateurs

Les implants dentaires ne posent pas de problème de traitement

Tout client ayant un problème médical doit être dirigé vers un médecin

Informations reliée au mode de vie

Combien de verres d'eau buvez-vous par jour : ____ Café : ____ Alcool : ____

Fumez-vous : ☐ oui ☐ non

Bronzez-vous facilement : ☐ oui ☐ non

Quelle est votre fréquence d'exposition solaire ?

☐ Minimale ☐ Moyenne ☐ Forte

Appliquez-vous une protection solaire ? ☐ oui ☐ non SPF : ____

Comment entretenez-vous votre peau ? ☐ Savon ☐ Démaquillant ☐ Lotion

☐ Crème de jour ☐ Crème de nuit ☐ Sérum ☐ Crème contour des yeux

Autres : _____


Fréquence de soins du visage en institut de beauté : _____

Signature

« Je certifie ne présenter aucune des contre-indications et que les indications mentionnées sont exactes »

LE SKIN REMODELING SYSTEM^{MC}

L'appareil **Skin Remodeling System^{MC}** de Silhouet-Tone innove en offrant un traitement de remodelage révolutionnaire qui fait travailler en synergie **5 technologies scientifiquement éprouvées** pour obtenir les résultats les plus remarquables.

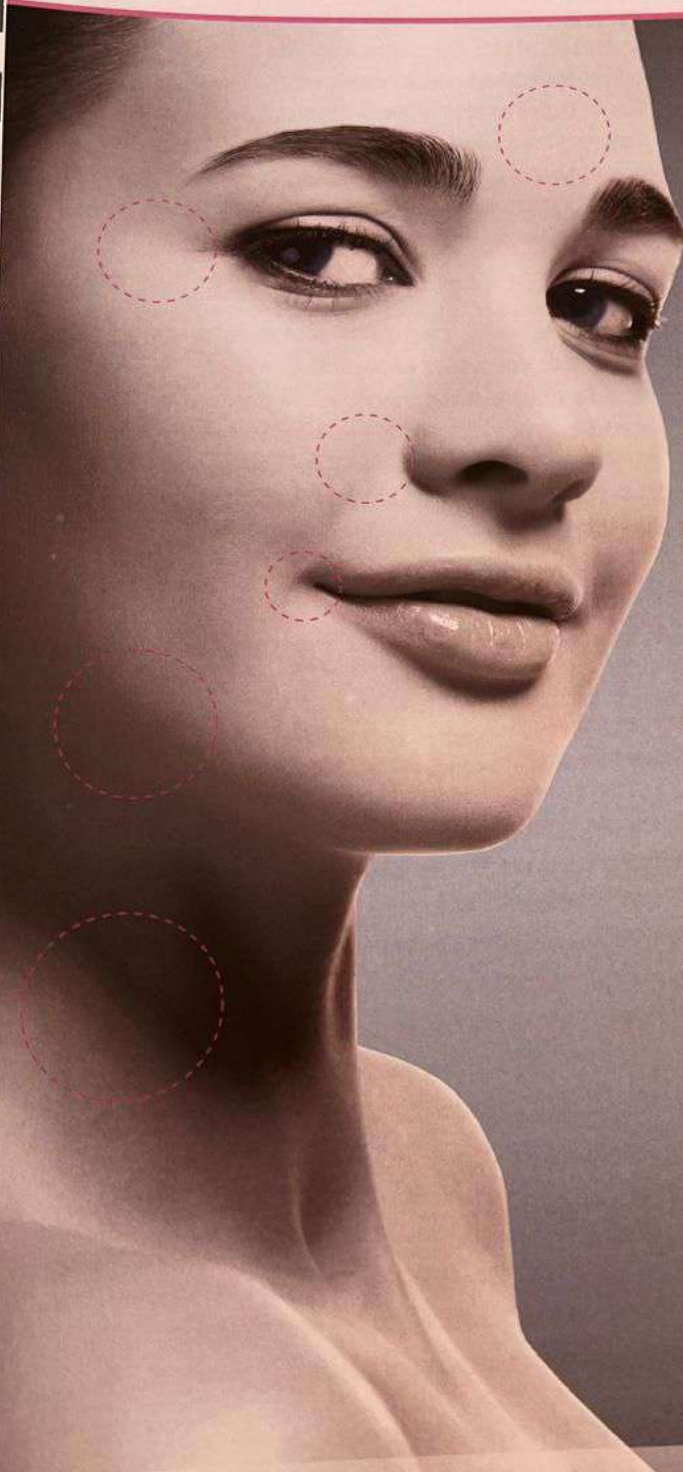

CE SYSTÈME EXCEPTIONNEL
TRAITE À LA SOURCE
CHAQUE PROBLÈME EN :

- 01 **stimulant le renouvellement des cellules** et la croissance d'une nouvelle peau assainie ;
- 02 **activant la production de néocollagène**, qui redonne volume et élasticité à la peau, tout en comblant les rides de l'intérieur ;
- 03 **détendant les lignes d'expression** et en atténuant les zones d'intensité faciale, telles que les pattes d'oie, les rides causées par l'inquiétude et les ridules labiales ;
- 04 **resserrant/raffermissant** la peau pour lui donner une apparence de jeunesse lisse et ferme ;
- 05 **restaurant le tonus musculaire** par le remodelage du contour facial, le lissage des joues, ainsi que le raffermissment du menton et du cou.

Ces **nouvelles technologies révolutionnaires** viennent efficacement en aide aux personnes voulant retrouver une apparence plus jeune à avoir l'air aussi jeunes qu'elles se sentent.


SILHOUET-TONE®

**Renversez la barrière du vieillissement
et allez au-delà des traitements
superficiels**

avec le révolutionnaire

**SKIN REMODELING
SYSTEM**
powered by HVPC technology

- 5** Technologies
- 4** Résultats ciblés
- 30** Minutes de traitement
- 2** Progrès dans le rajeunissement structurel
- 1** Tête de traitement pour toutes les technologies







